


Navodila za uporabo

BD PosiFlush™ (NaCl 0.9%) pred-napolnjene brizge




Za kirurško tehniko asepse, ki zahteva kritično upravljanje sterilnega polja, uporabljajte BD PosiFlush™ XS

1. Preverite identiteto pacienta
2. Prepričajte se, da je embalaža nepoškodovana
3. Preverite vsebino brizge in rok trajanja
4. Kliknite za aktivacijo. Nežno pritisnite bat, dokler ne začutite/zaslišite klika. To bo osvobodilo bat
5. Odvijte zamašek in iztisnite zrak
6. Očistite vstopno mesto katetra skladno s protokolom vaše ustanove

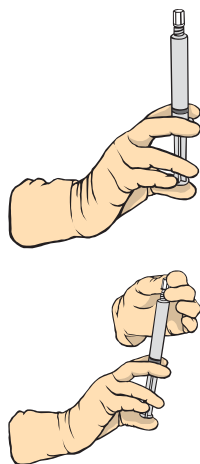

Za standardno aseptično tehniko uporabite BD PosiFlush™ SP

7. Odstranite zamašek in pričvrstite brizgo na kateter
8. Za izpiranje katetra uporabite tehniko potisni/ustavi, ki ustvarja turbulentni tok tekočine
9. Zaključite izpiranje s tehniko pozitivnega pritiska. Če je na kateter nameščen podaljšek s stiščem, zaprite stišček, medtem ko palec ostane na bat brizge
10. Odvrzite med infektivne odpadke skladno s protokolom vaše ustanove

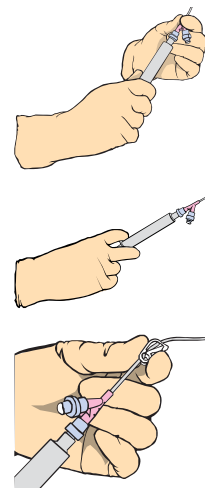

NI NAMENJENO REDČENJU ZDRAVIL ALI REHIDRACIJI BOLNIKOV



(Za več informacij preberite navodila za uporabo)
Priporočeno s strani ANTT za promocijo varnejše aseptične tehnike



BD Switzerland SàRL, Terre Bonne Park - A4, Route de Crassier 17, 1262 Eysins, Switzerland
Tel: +41 21 556 30 00

bd.com

